

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/chusta-comfort-do-podnosnika-pacjenta-z-podparciem-glowy-p-260.html>




Chusta Comfort do podnośnika pacjenta (z podparciem głowy)

Cena brutto	749,00 zł
Cena netto	693,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	PODCOMFORBWINN
Kod producenta	PODCOMFORBWINN
Producent	Winnicare
Kod Win:	009-0976(R)
Typ nosidła:	pełne
Materiał	poliester
Zastosowanie wieszaki	2, 3 i 4-punktowe
Udźwig	XS do L - 275kg, XL i XXL - 400kg
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
Temp prania	85°C
telefon I	 +48 729 888 698
telefon II	 +48 663 221 727

Opis produktu



Tabela rozmiarów **podwieszek**

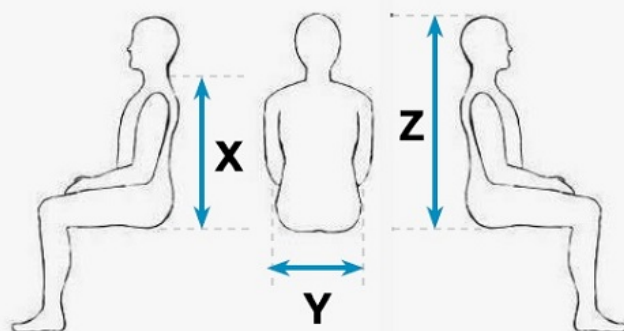

Podwieszki All Universal
bez podparcia głowy,
także z podparciem głowy:
toaletowa i niska

XXS**XS****S****M****L****XL****XXL**

Y (obwód bioder)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
X (odległość od szyi do dolnej części pleców)	-	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm

Podwieszki All Universal
z podparciem głowy (PG)

Y (obwód bioder)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
Z (odległość od szyi do dolnej części pleców)	-	75 cm	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm	100 cm


Podwieszki pionizacyjne

Obwód talii	-	62 – 80 cm	66 – 90 cm	80 – 100 cm	100 – 126 cm	110 – 132 cm	120 – 140 cm
--------------------	---	------------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Podwieszki do chodzenia

Obwód talii	62 – 75 cm	76 – 84 cm	85 – 92 cm	93 – 105 cm	106 – 114 cm	116 – 130 cm	-
--------------------	------------	------------	------------	-------------	--------------	--------------	---

Typ materiału. Wszystkie podwieszki zrobione są z poliestru.

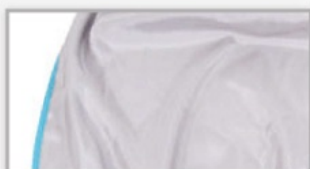

Poliester

Bardzo wytrzymały
i łatwy do czyszczenia



Siatka poliestrowa

Stworzona specjalnie
do kąpieli



Tabela modeli podwieszek.

Kategoria	Nazwa	Poliester bez podparcia głowy	Poliester z podparciem głowy	Poliester - siatka bez podparcia głowy	Poliester - siatka z podparciem głowy
Podwieszka pełna	Universal Dla amputantów	●	●	○	○
Podwieszka pełna	Universal Basic	●	●	●	●
Podwieszka pełna	Universal Comfort	●	●	●	●
Podwieszka pełna	Universal Hammock	○	○	●	●
Podwieszka pełna	UniversalHammock Toaletowa	○	○	●	●
Podwieszka półpełna	Low Back - Niska	●	○	●	○
Podwieszka półpełna	Toaletowa	●	○	○	○
Podwieszka do pionizacji	Pionizacyjna	●	○	○	○
Podwieszka do pionizacji	Pionizacyjna z 2-pasami	●	○	○	○
Podwieszka do chodzenia	Do chodzenia	●	○	○	○

Nosidło COMFORT z podparciem pod głowę do podnośnika dla niepełnosprawnych - Winnicare

ZASTOSOWANIE:

1. Potrzebują wsparcia i dodatkowego podparcia w okolicy głowy.
2. Wymagają wsparcia dla całego ciała oraz stabilizacji miednicy.
3. Oczekują podparcia dla górnej części ciała, co przekłada się na większy

	komfort i poczucie bezpieczeństwa. 4. Są osobami z różnymi stopniami niepełnosprawności fizycznej lub posiadają inne specjalne potrzeby. 5. Używają chusty do zmiany pozycji z siedzącej na leżącą lub odwrotnie, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo podczas przemieszczania.
---	--

Jak przenosić pacjenta z wózka na łóżko

Transfer pacjenta z wózka na łóżko jest jedną z codziennych czynności, z którymi muszą sobie radzić opiekunowie osób niepełnosprawnych. Aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort zarówno pacjentowi, jak i sobie, warto skorzystać z nowoczesnych rozwiązań, takich jak nosidło COMFORT z podparciem pod głowę marki Winnicare. Dzięki specjalnemu kształtowi podwieszki, która obejmuje wsparcie dla całego ciała, stabilizację miednicy oraz dodatkowe podparcie w okolicy głowy, dzięki temu przenoszenie chorego odbywa się płynnie i bezpiecznie.

Przed przystąpieniem do przenoszenia pacjenta, należy upewnić się, że nosidło jest prawidłowo zamocowane do podnośnika, a pacjent znajduje się w bezpiecznej, stabilnej pozycji. Ważne jest, aby nosidło było odpowiednio dopasowane do ciała chorego, zapewniając wsparcie w kluczowych punktach. Następnie, delikatnie podnieść pacjenta z wózka, kontrolując ruch podnośnika, aby proces ten był jak najbardziej płynny i spokojny. Po osiągnięciu odpowiedniej wysokości, z pacjenta należy ostrożnie podjechać nad łóżko i równie delikatnie opuścić na powierzchnię łóżka, dbając o jego wygodę i bezpieczeństwo.

Jak podnieść osobę niepełnosprawną z ziemi

Podnoszenie pacjenta z ziemi może być wyzwaniem, wymagającym nie tylko siły, ale przede wszystkim odpowiedniej techniki, aby uniknąć ryzyka kontuzji zarówno dla osoby podnoszonej, jak i opiekuna. Nosidło COMFORT z podparciem pod głowę od Winnicare jest w tej sytuacji nieocenioną pomocą, umożliwiając bezpieczne podniesienie pacjenta z ziemi.

Przygotowanie do podniesienia rozpoczyna się od rozmieszczenia chusty pod pacjentem w taki sposób, aby zapewnić równomierne wsparcie dla całego ciała oraz dodatkowe podparcie dla głowy. Następnie, przy pomocy podnośnika, nosidło wraz z pacjentem delikatnie podnosimy, dbając o to, aby ruch był płynny i kontrolowany. Ważne jest, aby cały czas komunikować się z pacjentem, informując go o kolejnych krokach, co może pomóc w zmniejszeniu stresu związanego z sytuacją.

W obu opisanych sytuacjach, nosidło COMFORT z podparciem pod głowę stanowi kluczowe narzędzie, które nie tylko ułatwia przenoszenie i

podnoszenie pacjentów, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo i komfort tych operacji. Podwieszka jest doskonałym wyborem do użytku domowego do DPS-ów oraz placówek medycznych, zapewniając skuteczną pomoc w opiece nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma WINNCARE POLSKA SP.ZO.O.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość nosidła:: - wybierz , - "S" , - "M" , - "L" , - "XL" , - "XXL"