

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/chusta-uniwersalna-basic-do-podnosnika-pacjenta-z-podparciem-glowy-p-255.html>




Chusta Uniwersalna BASIC do podnośnika pacjenta (z podparciem głowy)

Cena brutto	749,00 zł
Cena netto	693,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	PODUNIBASICZWINN
Kod producenta	PODUNIBASICZWINN
Producent	Winnicare
Kod Win:	009-0982(R)
Typ nosidła:	pełne
Materiał	poliester
Zastosowanie wieszaki	2, 3 i 4-punktowe
Udźwig	XS do L - 275kg, XL i XXL - 400kg
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
Temp prania	85°C
telefon I	 +48 729 888 698
telefon II	 +48 663 221 727

Opis produktu



Tabela rozmiarów **podwieszek**

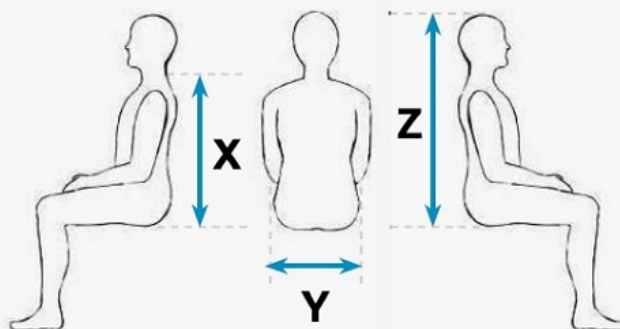

Podwieszki All Universal
bez podparcia głowy,
także z podparciem głowy:
toaletowa i niska

XXS**XS****S****M****L****XL****XXL**

Y (obwód bioder)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
X (odległość od szyi do dolnej części pleców)	-	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm

Podwieszki All Universal
z podparciem głowy (PG)

Y (obwód bioder)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
Z (odległość od szyi do dolnej części pleców)	-	75 cm	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm	100 cm


Podwieszki pionizacyjne

Obwód talii	-	62 – 80 cm	66 – 90 cm	80 – 100 cm	100 – 126 cm	110 – 132 cm	120 – 140 cm
--------------------	---	------------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Podwieszki do chodzenia

Obwód talii	62 – 75 cm	76 – 84 cm	85 – 92 cm	93 – 105 cm	106 – 114 cm	116 – 130 cm	-
--------------------	------------	------------	------------	-------------	--------------	--------------	---

Typ materiału. Wszystkie podwieszki zrobione są z poliestru.

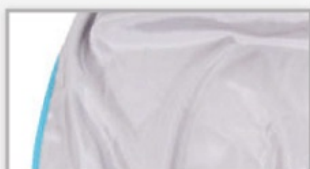

Poliester

Bardzo wytrzymały
i łatwy do czyszczenia



Siatka poliestrowa

Stworzona specjalnie
do kąpieli

 Tabela modeli podwieszek.

Kategoria	Nazwa	Poliester bez podparcia głowy	Poliester z podparciem głowy	Poliester - siatka bez podparcia głowy	Poliester - siatka z podparciem głowy
Podwieszka pełna	Universal Dla amputantów	●	●	○	○
Podwieszka pełna	Universal Basic	●	●	●	●
Podwieszka pełna	Universal Comfort	●	●	●	●
Podwieszka pełna	Universal Hammock	○	○	●	●
Podwieszka pełna	UniversalHammock Toaletowa	○	○	●	●
Podwieszka półpełna	Low Back - Niska	●	○	●	○
Podwieszka półpełna	Toaletowa	●	○	○	○
Podwieszka do pionizacji	Pionizacyjna	●	○	○	○
Podwieszka do pionizacji	Pionizacyjna z 2-pasami	●	○	○	○
Podwieszka do chodzenia	Do chodzenia	●	○	○	○

Nosidło Uniwersalne BASIC z podparciem pod głowę do podnośnika dla niepełnosprawnych - Winnicare

ZASTOSOWANIE:

1. Przystosowana dla użytkowników w wymagających dodatkowego wsparcia w okolicy głowy, co zapewnia lepszą ochronę i stabilizację.
2. Oferuje kompleksowe podparcie dla górnej części ciała oraz wokół ud,



- zwiększając tym samym poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
3. Umożliwia bezpieczne przenoszenie osób między różnymi pozycjami, takimi jak siedząca i leżąca, co ułatwia codzienne czynności.
 4. Idealna dla osób z ograniczoną stabilnością tułowia, które oprócz wsparcia wokół tułowia potrzebują również wsparcia dla głowy.
 5. Stanowi wszechstronne rozwiązanie umożliwiające opiekunom łatwiejsze i bezpieczniejsze przenoszenie osób z ograniczeniami ruchowymi, zapewniając im jednocześnie komfort i ochronę.

Kamizelka Uniwersalna do podnośnika dla niepełnosprawnych

Wśród szerokiej gamy akcesoriów wspierających opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi, kamizelka uniwersalna do podnośnika pacjenta zajmuje miejsce szczególne. Zaprojektowana z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa zarówno dla użytkownika, jak i opiekuna, stanowi niezastąpione narzędzie w codziennej opiece. Kamizelka ta jest przystosowana do użytku w różnych

środkach – zarówno w domowym zaciszu, jak i w profesjonalnych placówkach, takich jak domy opieki społecznej (DPSy) czy szpitale.

Wykonana z wysokiej jakości, trwałych materiałów, kamizelka uniwersalna gwarantuje wygodę noszenia dzięki swojej ergonomicznej konstrukcji. Dostosowuje się do kształtu ciała, nie powodując otarć czy dyskomfortu. Dodatkowo, łatwe w obsłudze zapięcia i regulacje pozwalają na szybkie i bezpieczne przenoszenie osoby niepełnosprawnej. Dzięki temu, że kamizelka jest kompatybilna z większością dostępnych na rynku podnośników, staje się wszechstronnym rozwiązaniem dla różnorodnych potrzeb użytkowników.

Jak przenieść osobę niepełnosprawną z łóżka na wózek?

Przenoszenie osoby niepełnosprawnej z łóżka na wózek to czynność wymagająca nie tylko odpowiedniej techniki, ale i środków, które zapewnią bezpieczeństwo oraz komfort zarówno dla opiekuna, jak i osoby przenoszonej. Używając kamizelki uniwersalnej do podnośnika rehabilitacyjnego, proces ten staje się znacznie prostszy i bezpieczniejszy.

Pierwszym krokiem jest odpowiednie przygotowanie osoby do przeniesienia. Należy upewnić się, że kamizelka jest prawidłowo założona i dostosowana do ciała użytkownika, co zapobiegnie ewentualnym dyskomfortom podczas przenoszenia. Następnie, za pomocą podnośnika, delikatnie podnieść osobę, dbając o to, aby jej głowa i kręgosłup były we właściwej pozycji. Ważne jest, aby cały proces odbywał się spokojnie i bez pośpiechu, co zapewni komfort psychiczny osobie przenoszonej.

Po bezpiecznym podniesieniu, należy delikatnie przemieścić osobę nad wózek inwalidzki, zwracając szczególną uwagę na to, aby nogi znalazły się w odpowiedniej pozycji. Następnie, opuszczając osobę na siedzisko wózka, należy upewnić się, że znajduje się ona w stabilnej i wygodnej pozycji. Warto też dostosować pasy kamizelki, aby zapewnić dodatkowe wsparcie i bezpieczeństwo.

Zarówno kamizelka uniwersalna do podnośnika, jak i właściwa technika przenoszenia, są kluczowymi elementami, które znacznie ułatwiają codzienną opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Dzięki nim, opiekunowie mogą zapewnić swoim podopiecznym wygodę i bezpieczeństwo, jednocześnie minimalizując ryzyko własnego przeciążenia czy kontuzji. Wybór odpowiednich akcesoriów i stosowanie się do zalecanych metod przenoszenia to podstawa dobrej opieki, która wpływa na jakość życia osób wymagających wsparcia, jak również ich opiekunów.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma WINNCARE POLSKA SP.ZO.O.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość nosidła:: - wybierz , - "S" , - "M" , - "L" , - "XL" , - "XXL"