

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/podrozny-skuter-inwalidzki-alya-vermeiren-p-105.html>



Podróżny skuter inwalidzki ALYA Vermeiren

Cena brutto	7 990,00 zł
Cena netto	7 398,15 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	SKUTALYAER
Kod producenta	SKUTALYAER
Producent	Vermeiren
Wysokość:	71-91cm
Długość	90,5cm
Szerokość	42cm
Promień skrętu	142cm
Max kąt podjazdu	6°/10%
Silniki	180W
Udźwig	115kg
Waga urządzenia	20kg
Prezentacja	 ZAMÓW POKAZ
Finansowanie	 (DO)FINANSOWANIE
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727
telefon II	 +48 697 301 691

Opis produktu

Podróżny skuter elektryczny dla osób niepełnosprawnych ALYA

TU KUPISZ NOWY MODEL: [Kompaktowy skuter dla niepełnosprawnych ONE - Vermeiren](#)

DOFINANSOWANIE AKTYWNY SAMORZĄD 2020r (od 1marca do 31sierpnia) - dofinansowanie maksymalnie 7500zł brutto wkład własny obniżony do 25% wartości sprzętu

Kompaktowy składany skuter podróżny



Kompaktowe rozmiary

Alya to bardzo kompaktowy, składany skuter. Łatwy do przenoszenia, umożliwia użytkownikowi korzystanie w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki dużemu dystansowi jaki może pokonywać Alya jest równie wygodna na zewnątrz, jak i wewnątrz.

Transport

Skuter Alya jest perfekcyjny do przewożenia wszelkimi środkami transportu. Podróżuj razem ze swoim skuterem pociągiem, komunikacją miejską. Zmieści się do bagażnika bardzo małego auta. Lekki, kompaktowy, składany w minutę. Idealny na krótsze dystanse, bardzo wygodny i sprawny w prowadzeniu.

Całkowicie składany

Wyłącz Alye i wyjmij kluczyk ze stacyjki. Opuść kolumnę kierownicy do najniższego położenia i pociągnij do góry żółtą dźwignię z tyłu. Następnie opuść siedzenie do dołu. Złóż podnóżek i zsuń ramę podwozia do siebie. Odciągnij żółte pokrętło u dołu kolumny kierownicy i przesunij je w dół. Teraz Alya jest całkowicie gotowa do transportu.

Sprawdź: [Jak wybrać skuter inwalidzki?](#)



Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma VERMEIREN POLSKA SP.ZO.O.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

V-MAX - BATERIA - ZASIĘG: 6km/h - 11,6Ah - 13km , 6km/h - 17,4Ah - 19km (+ 1 500,00 zł)

Film jak złożyć skuter ALYA

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Przeznaczeniem skutera jest zapewnienie mobilności w pozycji siedzącej osobom niepełnosprawnym ruchowo, których stan zdrowia umożliwia bezpieczne sterowanie skuterem z napędem elektrycznym.

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Nie wolno używać na nierównym terenie lub na polach. Nie wolno używać produktu jeśli osoba obsługująca nie posiada zdolności fizycznych i umysłowych do bezpiecznego obsługiwanie urządzenia. Przeciwwskazania nie mogą być związane z jednym konkretnym obrazem klinicznym, zależą od indywidualnej oceny stanu zdrowia potencjalnego użytkownika. Wybór pomocy ortopedycznej odpowiedniej dla danego obrazu klinicznego musi być zawsze dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku z urządzenia, ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z produktu oraz ryzyko kolizji i zniszczenia mienia, związanych z niewłaściwym przemieszczaniem się. Możliwe jest ryzyko uwięzienia luźnych części garderoby między ruchomymi elementami urządzenia.

POMOC

- [**SKUTER CZY WÓZEK ELEKTRYCZNY INWALIDZKI DLA SENIORA?**](#)
- [**JAKI WYBRAĆ SKUTER DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH?**](#)
- [**SKUTERY INWALIDZKIE SKŁADANE DO SAMOCHODU**](#)